

# Bedienungsanleitung Etikettierer

## Farbwalzentausch

Drücken Sie bitte die gekennzeichneten Tasten (1) zusammen und ziehen den Walzenhalter nach vorne auf bis die Farbwalze sichtbar ist.



Drücken Sie die geriffelten Schenkel die sich am Farbwalzenhalter befinden zusammen und ziehen diese hoch. Tauschen Sie die Farbwalze aus und legen Sie diese wieder ein (einrasten). Verschieben Sie die den Walzenhalter.



Sollte der Anpressdruck der Rolle nicht ausreichen, können Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Druckeinheit nach vorne versetzen (siehe Abbildung).



## Einstellung von Textzeichen

a) ziehen Sie das Einstellrad nach rechts auf die gewünschte Position.

b) drehen Sie nun das Einstellrad zur Eingabe des gewünschten Buchstaben

Bitte beachten Sie, dass zur Buchstabeneingabe folgende Einstellungen zu übernehmen sind:

Möchten Sie den Buchstaben T verwenden, so drehen Sie bitte das Einstellrad auf den Buchstaben G (siehe Beispiel unten).

Sie finden die Buchstabenliste am Kopf des Etikettierer(silberner Aufkleber).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Beispiel:

Ihr Name:

T I N A


Buchstaben auswählen:

G V A N


**OMNI**  
**DENT**®  
We care. You smile.

## Wechsel der Etikettenrolle


Ziehen Sie bitte die gekennzeichneten Hebel (2 links und rechts) nach hinten. Im Anschluss öffnet sich die Bodenplatte (1). Öffnen Sie diese und entnehmen Sie die alte Etikettenrolle.

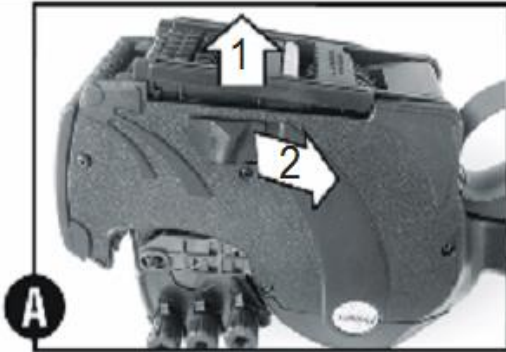

Legen Sie die neue Etikettenrolle mit der Etikettenrückseite nach oben ein. Ziehen Sie den Etikettenstreifen ca. 15 cm aus dem Etikettierer. Schließen Sie die Bodenplatte (1) bis sie einrastet. Entfernen Sie bitte die Etiketten auf dem Etikettenstreifen.

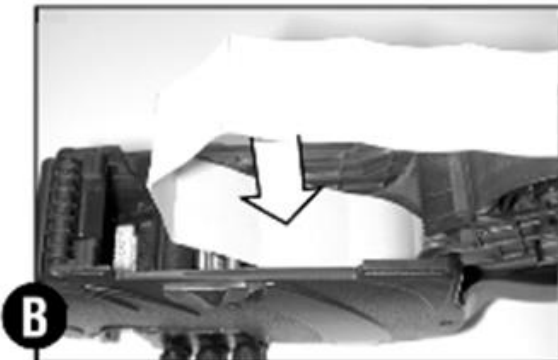

Legen Sie nun den Etikettenstreifen hinter die Alu-Transportrollen und betätigen Sie mehrfach den Hebel zum Etikettieren bis sich das Etikettenband einzieht und stramm sitzt. Nach mehrfacher Betätigung produzieren Sie die ersten Etiketten die sich selbstständig ausrichten.

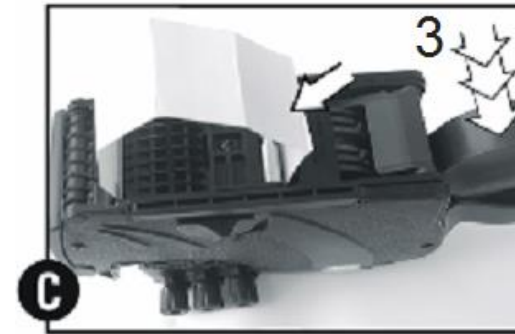

Sollte die automatische Ausrichtung fehlschlagen, lösen Sie bitte mit Hilfe eines Schraubenziehers die Kreuzschraube (Justierung der Gleitplatte). Nach erfolgter Justierung ziehen Sie die Kreuzschraube wieder fest.

